

# LINGETTES POUR LA DÉSINFECTION ALCOOLIQUE RAPIDE

## Incides™ N

Pour la désinfection de produits médicaux et de surfaces de tout type

**Large spectre d'action contre les bactéries (y compris le TB) et les levures.**

Puissance de désinfection élevée sur toutes les surfaces résistant à l'alcool. L'efficacité a été testée à l'aide de la solution d'imprégnation libérée par la lingette.

- ▲ Temps d'action réduits
- ▲ Directement applicable
- ▲ Testé dermatologiquement



# Incides™ N


Pour la désinfection de produits médicaux et de surfaces de tout type

Notre prestation	Votre bénéfice
La libération de la substance active de la lingette dans la concentration indiquée a été prouvée.	Puissance de désinfection élevée, les expertises sur l'efficacité sont basées sur des conditions de travail réelles.
Lingette prêtes à l'emploi avec des temps d'action particulièrement réduits.	Désinfection optimale de produits médicaux et de surfaces résistant à l'alcool
Dermatologiquement contrôlé, parfum frais	Grande facilité d'utilisation et agréable à l'emploi


EFFICACITE	CONCENTRATION	TEMPS D'ACTION min.
Liste VAH (bactéricide, levuricide, tuberculocide)		
Désinfection de surfaces selon VAH par des moyens mécaniques sous une charge réduite et élevée	concentré	5
Contrôle selon la directive DVV/RKI		
Action virucide limitée (y compris les VIH, HBV, HCV) selon la recommandation 1/2004* du RKI	concentré	0,5
Rotavirus*	concentré	5
Adénovirus*	concentré	15
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	concentré	15
Normes EURO (charge faible et élevée)		
NF EN 13727 (bactéricide)	concentré	1
NF EN 13624 (levuricide)	concentré	1
NF EN 14348 (mycobactéricide)	concentré	1
Désinfection de surfaces selon la directive DGHM 2001 (charge faible et élevée)		
Tuberculocide par des moyens mécaniques	concentré	1

\* DVV 2015 (test de suspension)

## OUVRIR ET ENLEVER

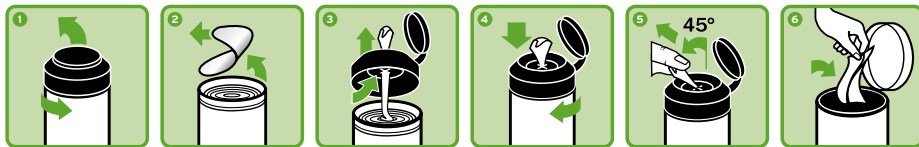

## UTILISATION DE L'EMBALLAGE DE RECHARGE

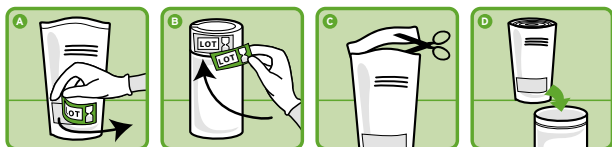

Effectuez alors les étapes

3-6.

Distribué par :

**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41 (0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch



**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173-599-1900

CE 0297



www.ecolabhealthcare.ch/f

© 2018 Ecolab Inc. Tous droits réservés.

# RAPIDE FLEXIBLE TOLÉRÉ PAR LA PEAU



Lingettes désinfectantes alcooliques pour appareils médicaux et petites surfaces selon la directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux



Chiffons pour la désinfection alcoolique rapide de surfaces résistant à l'alcool, art. CHZN 1677

## MODE D'EMPLOI

Pour la désinfection d'appareils médicaux et d'instruments de matériaux résistant à l'alcool, de pièces à main et angulaires de cabinets dentaires, de pièces de préhension etc. ainsi que de surfaces de tout type résistant à l'alcool.

Retirez les lingettes individuellement, essuyez les objets/surfaces à traiter. Mouillez-les complètement. Refermez la boîte.

## COMPOSITION

100 g de la solution d'imprégnation comprennent : 35 g de 2-Propanol, 25 g de 1-Propanol

## EXPERTISE

Tests microbiologiques, virologiques, toxicologiques et écologiques exhaustifs.

Sur demande, le dossier d'expertise actuel pourra être mis à votre disposition.

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
Incides™ N Boîte	6 x 90 chiffons	30 424 90
Incides™ N Emballage de recharge	5 x 90 chiffons	30 425 10

## STOCKAGE

Le produit dans l'emballage d'origine ne doit pas être stocké à une température supérieure à 25°C.

À stocker dans un local frais, sec et à l'abri du soleil direct.

**Durée de conservation après ouverture : 3 mois**

VEILLEZ A LA PRUDENCE LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS BIOCIDES ET MEDICAUX L'ETUDE DE L'ETIQUETTE ET DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT EST OBLIGATOIRE AVANT TOUTE USAGE.

PRODUIT RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL.

**ECOLAB®**

HC 983 état du 06/2018