

DESINFECTION ALCCOLIQUE RAPIDE

Incidin™ Liquid

Spray prêt à l'emploi pour la désinfection alcoolique rapide

Large spectre d'action contre les bactéries (y compris les TB) et les levures.

Grande puissance désinfectante sur toutes les surfaces résistantes à l'alcool même dans des zones à risque.

- ▶ Rapide
- ▶ Sans aldéhydes
- ▶ Norovirucide

TESTÉ SELON
EN 16615
ET DE FAÇON PRATIQUE



Incidin™ Liquid

Spray prêt à l'emploi pour la désinfection alcoolique rapide

Notre prestation	Votre bénéfice
Solution (spray) prêt à l'emploi. Temps d'action réduit, parfum agréable.	Désinfection rapide combinée à l'application puissante et ciblée. Parfum agréable.
Formule équilibrée et synergique de différentes substances actives, sans aldéhydes.	Bon mouillage, séchage rapide et sans résidus grâce aux alcools, particulièrement pratique.
Application dans le système Incidin™ Dry Wipes System.	Application rapide au « Point de service » avec une durée de vie de 28 jours et des chiffons haut de gamme de qualité premium.

EFFICACITE	CONCENTRATION	TEMPS D'ACTION min.
Liste VAH (bactéricide, levuricide, tuberculicide)		
Désinfection de surfaces selon la directive DGHM 2001 par des moyens mécaniques sous une charge réduite et élevée	concentré	5
Contrôle selon la directive DVV/RKI		
Action virucide limitée (y compris les VIH, HBV, HCV) selon la recommandation 1/2004* du RKI		
Norovirus (MNV)*	concentré	10
Rotavirus*	concentré	0,5
Adenovirus*	concentré	1
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	concentré	10
Normes EURO (charge faible et élevée)		
EN 13727 (bactéricide)	concentré	1
EN 13624 (levuricide)	concentré	1
EN 14348 (tuberculicide)	concentré	1
EURO essai à 4 Normes zones (charge élevée)		
EN 16615 (bactéricide)	concentré	1
EN 16615 (levuricide)	concentré	1
Désinfection de surfaces selon la directive DGHM 2001 (charge faible et élevée)		
Mycobactéricide, sans moyens mécaniques	concentré	1

* DVV 2015 (test de suspension)

MODE D'EMPLOI



- 1 Pulvériser le produit sur la surface.
- 2 Nettoyer la surface à l'aide d'une lingette. Veillez au mouillage correct.
- 3 Laissez sécher.



- 1 Pulvériser le produit sur une lingette propre.
- 2 Nettoyer la surface. Veillez au mouillage correct.
- 3 Laissez sécher.



- 1 Pulvériser le produit sur la surface. Veillez au mouillage correct.
- 2 Laissez sécher.



- 1 Retirez une lingette du distributeur.
- 2 Nettoyer la surface. Veillez au mouillage correct.
- 3 Laissez sécher.

Distribué par :

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900

CE 0297



www.ecolabhealthcare.ch/f



Désinfection de surfaces pour produits médicaux



Désinfection alcoolique rapide.
© CHZN 1676

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi pour le nettoyage ou la pulvérisation. Application également dans le distributeur de chiffons (Incidin™ Dry Wipes System). Appliquez le produit sur un chiffon de cellulose sèche. Nettoyez la surface, laissez sécher ou bien pulvériser le produit sur la surface à une distance d'env. 30cm (env. 40ml/m²) et laissez sécher. Retirez un chiffon imbibé du distributeur (Incidin™ Dry Wipes System) et nettoyez la surface. Veillez au mouillage homogène. Dans la mesure où des appareils électriques sont employés, il faut veiller à la protection anti-déflagrante ou bien à la mise hors tension des appareils. Les prescriptions en matière d'accidents imposent le port de gants de protection.

COMPOSITION

Les suivantes substances actives sont contenues dans 100g du produit :

35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol

EXPERTISE

Tests exhaustifs microbiologiques, virologiques, toxicologiques et écologiques. Sur demande, nous mettons volontiers nos expertises actuelles à votre disposition.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ Liquid Flacon	12 x 650 ml	30 893 20
Incidin™ Liquid Flacon	12 x 1 L	30 257 60
Incidin™ Liquid Bidon	2 x 5 L	30 257 80
Incidin™ Liquid Bidon	30 L	30 278 60
Incidin™ Wipes Dispenser N Distributeur de lingettes	1 unité par carton	100 33 125
Incidin™ Wipes HygPack Couverture rouge	6 unités par carton	100 32 690

STOCKAGE

Le produit est à stocker dans l'emballage original à une température de 25°C au maximum.

À stocker à un endroit frais et sec et à l'abri du soleil direct.

Durée de conservation après l'ouverture :
Jusqu'à la date de péremption imprimée.

VEILLEZ A LA PRUDENCE AVEC LES PRODUITS BIOCIDES ET MEDICAUX L'ETUDE DE L'ETIQUETTE ET DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT EST OBLIGATOIRE AVANT TOUTE UTILISATION.
RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL.