

SIMPLE · STABLE · EFFICACE

JUSQU'À LA DERNIÈRE LINGETTE

Incidin™ Wipes FlexPack

Distributeur de lingettes hygiéniques jetables pour une désinfection simple et efficace des surfaces.

L'Incidin™ Wipes FlexPack est, en combinaison avec des désinfectants de surfaces recommandé par Ecolab (p. ex. Incidin™ Pro), la toute dernière innovation pour la désinfection simple et efficace des surfaces.

LES AVANTAGES DE L'INCIDIN™ WIPES FLEXPACK

- ▲ SIMPLE - prêt à l'emploi en seulement 15 minutes
- ▲ STABLE - jusqu'à la dernière lingette
- ▲ EFFICACE - gain de temps, de place et réduction des coûts et déchets

Combinable avec Incidin™ OxyFoam S 5 litres

SPORICIDE DESINFECTION DES SURFACES POUR UNE DURÉE D'UTILISATION DE 31 JOURS

NOUVEAU



Incidin™ Wipes FlexPack

Distributeur de lingettes hygiéniques jetables pour une désinfection simple et efficace des surfaces.

Notre prestation	Votre avantage
Simple	Le distributeur de lingettes se remplit et s'étiquète aisément. Il est prêt à l'emploi en seulement 15 minutes. La poignée facilite le transport au POC (Point of Care). Un codage couleurs permet le remplissage avec de différents produits ou l'utilisation dans des zones / situations spéciales.
Stable	Le sac de support reste stable p.ex. sur le véhicule de nettoyage jusqu'au retrait de la dernière lingette.
Efficace	Fait gagner du temps grâce à la suppression du transport et du traitement, économise de l'espace de stockage et des coûts grâce à de processus plus efficaces, épargne les poubelles grâce à un volume réduit de déchets.
Kompatibel	Pour une utilisation en combinaison avec les désinfectants Ecolab pour surfaces suivants de la gamme Incidin™ : Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Rapid, Incidin™ Foam, Incidin™ Liquid, Incidin™ OxyFoam S

DESCRIPTION PRODUIT

Distributeur de lingettes hygiéniques jetables sous la forme d'un sac de support stable avec poignée. Parois latérales transparentes pour contrôler la consommation. Contient un rouleau de lingettes en tissu PET sec non-tissé non pelucheux de haute qualité (taille du lingettes 20 x 38 cm) à utiliser en combinaison avec les désinfectants choisis Ecolab pour surfaces de la gamme Incidin™ ainsi qu'un bouchon avec étiquettes et label hygiénique en trois couleurs (vert, rouge, bleu).

BESTELLINFORMATIONEN

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
Incidin™ Wipes FlexPack avec bouchon bleu	6 rouleaux de 99 lingettes / cartons	100 49 788
Incidin™ Wipes FlexPack avec bouchon vert	6 rouleaux de 99 lingettes / cartons	100 49 790
Incidin™ Wipes FlexPack avec bouchon rouge	6 rouleaux de 99 lingettes / cartons	100 49 789

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Porter des gants.




Remplir 2,5 L de solution désinfectante Incidin™.



Tenir le FlexPack aux endroits marqués à gauche ou à droite du couvercle. Tourner le couvercle sur le paquet dans le sens des aiguilles d'une montre, commencer le marquage jusqu'à l'enclenchement.



Tenir le FlexPack aux endroits marqués à gauche ou à droite du couvercle. Briser le label de sécurité en sens inverse des aiguilles d'une montre en dévissant le couvercle. Poser le couvercle sur le plan de travail avec la face supérieure vers le bas.

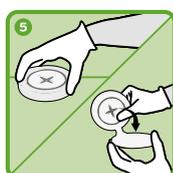

Ouvrir le couvercle.



Marquer l'étiquette couvercle avec les informations requises.



Retirer légèrement la première lingette.



Insérer la première lingette dans l'ouverture du couvercle et fermer le couvercle.



Le cas échéant, éliminer tout liquide avant de mettre au rebut. Pour ce faire, couper un coin supérieur pour évacuer aisément le liquide. Après, il sera possible de mettre l'Incidin™ Wipes FlexPack au rebut.

SIEGE PRINCIPAL
EUROPEEN :
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Suisse
+41 (0) 44-877-2001
www.ecolab.com

 **Ecolab (Suisse) GmbH**
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch



www.ecolabhealthcare.ch/f

ECOLAB®

HC 951 Mise à jour 06/2018