

# TÜCHER ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLDESINFEKTION

## Incides® N

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art

**Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionsleistung auf allen alkoholbeständigen Flächen. Wirksamkeit anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

- ▶ Kurze Einwirkzeiten
- ▶ Direkt einsetzbar
- ▶ Dermatologisch begutachtet



# Incides® N

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Nachgewiesene Wirkstoffabgabe aus dem Tuch in angegebener Konzentration	Hohe Desinfektionsleistung, Wirksamkeitsgutachten basieren auf den realen Arbeitsbedingungen
Gebrauchsfertige Tücher mit besonders kurzen Einwirkzeiten	Optimale Desinfektion von Medizinprodukten und allen alkoholbeständigen Oberflächen
Dermatologisch begutachtet mit frischem Duft	Hohe Anwenderfreundlichkeit und angenehm im Gebrauch


WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
<b>VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)</b>		
Flächendesinfektion gemäss VAH, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
<b>Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie</b>		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäss RKI-Empfehlung 1/2004*	konzentriert	0,5
Rotavirus*	konzentriert	5
Adenovirus*	konzentriert	15
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	konzentriert	15
<b>EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)</b>		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	1
<b>Flächendesinfektion nach DGHM Methode 2001 (geringe und hohe Belastung)</b>		
Tuberkulozid, mit Mechanik	konzentriert	1

\* DVV 2015 (Susp. Test)

## ÖFFNEN UND ENTNEHMEN



## VERWENDEN DES NACHFÜLLPACKS

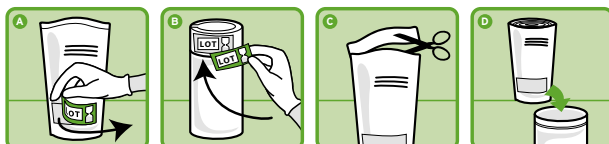

Anschliessend Schritte 3 – 6 ausführen.

SCHNELL.  
FLEXIBEL.  
HAUT-  
VERTRÄGLICH.



Alkoholische Schnelldesinfektionstücher für medizinische Geräte und kleine Flächen gem. Europäischer Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC



Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen aller Art. © CHZ 1677

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material, Hand- und Winkelstücke in der Zahnarztpraxis, Griffstücke, etc., sowie von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Gegenstände / Flächen abwischen und komplett benetzen. Dose wieder verschliessen.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Tränklösung sind enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incides® N Dose	6 x 90 Tücher	30 424 90
Incides® N Nachfüllpack	5 x 90 Tücher	30 425 10

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

**Haltbarkeit nach dem Öffnen:**  
3 Monate

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Vertrieb durch:

**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41 (0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch



**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173-599-1900

