

DIE ALKOHOLISCHE SCHNELL- DESINFEKTION ALS SCHAUM-SPRAY

Incidin™ Foam

Gebrauchsfertiges Schaum-Spray
zur alkoholischen Schnelldesinfektion

PRAXISNAH NACH
EN 16615
GETESTET

**Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionsleistung auf allen
alkoholbeständigen Flächen, geeignet in
Risikobereichen (z. B. im Tuchspender).

- ▶ Keine Aerosolbildung
- ▶ Exzellente Schaumbildung
- ▶ Angenehmer Geruch



Incidin™ Foam












Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Durch Schaumapplikation keine Vernebelung von Wirkstoffen, niedriger Alkoholgehalt	Angenehmes Arbeiten für den Anwender, ohne Gefahr des Einatmens von Aerosolen
Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch	Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit leistungsstarker und gezielter Anwendung, dabei besonders anwenderfreundlich
Anwendung im Incidin™ Dry Wipes System	Schnelle Anwendung am „Point of Care“ mit einer Standzeit von 28 Tagen und hochwertigen Tüchern in Premium-Qualität.


WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	konzentriert	5 Min.
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäss RKI-Empfehlung 1/2004*	konzentriert	0,5 Min.
Rotavirus*	konzentriert	5 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	konzentriert	15 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	30 Sek.
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	30 Sek.
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	3 Min.
EN 16615 (bakterizid, levurozid)	konzentriert	5 Min.

* DVV 2015 (Susp. Test)

GEBRAUCHSANWEISUNG

			<ol style="list-style-type: none"> 1 Auf die Oberfläche sprühen 2 Mit einem Tuch über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Auf die Oberfläche sprühen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 2 Trocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Tuch aus dem Tuchspender entnehmen 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen

Vertrieb durch:
ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
 Kägenstrasse 10
 4153 Reinach
 +41 (0) 61-466-94-66
 www.ecolabhealthcare.ch


ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 +49 (0) 2173-599-1900



STARK.
 SCHNELL.
 EINFACH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.
 © CHZN 1762

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Einschäumen, sowie zur Verwendung im Tuchspender (Incidin™ Dry Wipes System). Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml / m²) und antrocknen lassen. Getränktes Tuch aus Tuchspender (Incidin™ Dry Wipes System) entnehmen und die Oberfläche abwischen. Dabei auf gleichmässige Benetzung achten. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:
 20 g 2-Propanol, 10 g Ethanol,
 0,2 g Benzalkoniumchlorid,
 0,01 g Glucoprotamin™

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.
 Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ Foam Flasche	16 x 750 ml	30 460 10
Incidin™ Foam Kanister	2 x 5 L	30 134 40
Incidin™ Wipes Dispenser N Tuchspender	1 Stück im Karton	100 33 125
Incidin™ Premium Wipes HygPack Deckel rot	6 Stück / Karton	100 32 690

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.
 Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.