

# DIE ALKOHOLISCHE SCHNELLDESINFEKTION

## Incidin® Liquid

Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

PRAXISNAH NACH  
NEUER EN 16615  
GETESTET

Breites Wirkspektrum gegen  
Bakterien (inkl. TB) und Hefen.

Hohe Desinfektionsleistung auf  
allen alkoholbeständigen Flächen,  
selbst in Risikobereichen.

- ▶ Schnell
- ▶ Aldehydfrei
- ▶ Noroviruzid



# Incidin® Liquid

Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch	Schnelldesinfektion in Kombination mit starker und gezielter Anwendung, dabei angenehm im Gebrauch
Ausgewogene, synergetische Formulierung verschiedener Wirkstoffe, aldehydfrei	Gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung durch Alkohole, besonders anwenderfreundlich
Anwendung im Incidin® Dry Wipes System	Schnelle Anwendung am „Point of Care“ mit einer Standzeit von 28 Tagen und hochwertigen Tüchern in Premium-Qualität.

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
<b>VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)</b>		
Flächendesinfektion gemäss DGHM 2001, mit und ohne Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
<b>Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie</b>		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäss RKI-Empfehlung 1/2004*	konzentriert	0,5
Norovirus (MNV)*	konzentriert	10
Rotavirus*	konzentriert	0,5
Adenovirus*	konzentriert	1
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	konzentriert	10
<b>EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)</b>		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	1
<b>EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)</b>		
EN 16615 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 16615 (levurozid)	konzentriert	1
<b>Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)</b>		
Bakterizid, levurozid, ohne Mechanik	konzentriert	1

\* DVV 2015 (Susp. Test)

## GEBRAUCHSANWEISUNG


- 1 Auf die Oberfläche sprühen
- 2 Mit einem Tuch über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

- 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

- 1 Auf die Oberfläche sprühen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 2 Trocknen lassen

- 1 Tuch aus dem Tuchspender entnehmen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

Vertrieb durch:  
**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
 Kägenstrasse 10  
 4153 Reinach  
 +41(0) 61-466-94-66  
 www.ecolabhealthcare.ch

  
**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
 Ecolab-Allee 1  
 40789 Monheim am Rhein  
 +49(0) 2173-599-1900



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Alkoholische Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.  
 © CHZN 1676

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsfertige Lösung zum Wischen oder Sprühen, sowie zur Verwendung im Tuchspender (Incidin® Dry Wipes System). Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m<sup>2</sup>) und antrocknen lassen. Getränktes Tuch aus Tuchspender (Incidin® Dry Wipes System) entnehmen und die Oberfläche abwischen. Dabei auf gleichmässige Benetzung achten. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:  
 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Liquid Flasche	12 x 650 ml	30 893 20
Incidin® Liquid Flasche	12 x 1 L	30 257 60
Incidin® Liquid Kanister	2 x 5 L	30 257 80
Incidin® Liquid Kanister	30 L	30 278 60
Incidin® Wipes Dispenser N Tuchspender	1 Stück im Karton	100 33 125
Incidin® Premium Wipes HygPack Deckel rot	6 Stück / Karton	100 32 690

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

### Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.