

**EINFACH · STABIL · EFFIZIENT**

BIS ZUM LETZTEN TUCH

**Incidin™ Wipes FlexPack**

Hygienischer Einweg-Tuchspender für die einfache und effiziente Flächendesinfektion.

Das Incidin™ Wipes FlexPack ist in Kombination mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln (z. B. Incidin™ Pro) die Innovation für die einfache und effiziente Oberflächendesinfektion.

**DIE VORTEILE DES INCIDIN™ WIPES FLEXPACK**

- ▲ **EINFACH** - in nur 15 Minuten einsatzbereit
- ▲ **STABIL** - bis zum letzten Tuch
- ▲ **EFFIZIENT** - spart Zeit, Platz, Kosten und Müll

Kombinierbar mit  
**Incidin™ OxyFoam S 5 Liter**

**SPORIZIDE** FLÄCHENDESINFEKTION  
MIT EINER STANDZEIT VON 31 TAGEN

**NEU!**

# Incidin™ Wipes FlexPack

Hygienischer Einweg-Tuchspender für die einfache und effiziente Flächendesinfektion.

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
<b>Einfach</b>	Der Tuchspender ist einfach zu befüllen und zu beschriften. Er ist in nur 15 Minuten einsatzbereit. Der Tragegriff erleichtert den Transport an den POC (Point of Care). Eine Farbcodierung erlaubt die Befüllung mit unterschiedlichen Produkten oder den Einsatz in speziellen Bereichen / Situationen.
<b>Stabil</b>	Standtüte bleibt stabil auf z.B. dem Reinigungswagen bis zur Entnahme des letzten Tuches stehen.
<b>Effizient</b>	Spart Zeit durch den Wegfall von Transport und Aufbereitung, Spart Lagerplatz, Spart Kosten durch effizientere Prozesse und spart Abfallbehälter durch geringes Müllvolumen.
<b>Kompatibel</b>	Zur kombinierten Anwendung mit den folgenden Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™-Produktreihe: Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Rapid, Incidin™ Foam, Incidin™ Liquid, Incidin™ OxyFoam S

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hygienischer Einweg-Tuchspender in Form einer stabilen Standtüte mit Tragegriff. Transparente Seitenflächen zur Kontrolle des Verbrauchs. Enthält eine Tuchrolle aus hochwertigem trockenem fusselfreiem Premium-PET-Vliestuch (Tuchgröße 20 x 38 cm) zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™-Produktreihe sowie einer Verschlusskappe mit Aufklebern und Hygienesiegel in drei Farben (grün, rot, blau).


## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ Wipes FlexPack mit blauer Kappe	6 Rollen á 99 Tücher / Karton	100 49 788 PZN 138 79 554
Incidin™ Wipes FlexPack mit grüner Kappe	6 Rollen á 99 Tücher / Karton	100 49 790 PZN 138 79 494
Incidin™ Wipes FlexPack mit roter Kappe	6 Rollen á 99 Tücher / Karton	100 49 789 PZN 138 79 560




Eine Gebrauchsanleitung und weitere Informationen finden Sie hier


## ANWENDUNGSHINWEISE




1 Handschuhe anziehen.

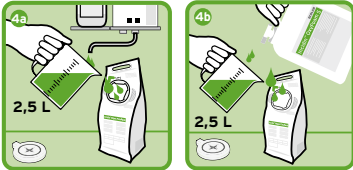


4a, 4b 2,5 L Incidin™ Desinfektionslösung einfüllen.




7 Halten Sie das FlexPack an den markierten Stellen links oder rechts vom Deckel fest. Drehen Sie den Deckel auf der Packung im Uhrzeigersinn fest, beginnen Sie an der Markierung bis es einrastet.




2 Halten Sie das FlexPack an den markierten Stellen links oder rechts vom Deckel fest. Brechen Sie das Siegel durch Aufschrauben des Deckels entgegen dem Uhrzeigersinn auf. Legen Sie den Deckel mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.

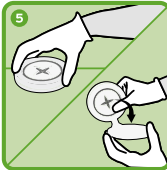


5 Öffnen Sie den Deckel.

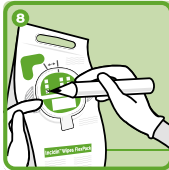


8 Beschriften Sie das Deckel-etikett mit den benötigten Informationen.



3 Ziehen Sie das erste Tuch ein Stück raus.



6 Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Deckel verschließen.



9 Vor Verwerfen ggf. Flüssigkeit entsorgen. Dafür schneiden Sie eine obere Ecke ab und entsorgen so einfach die Flüssigkeit. Danach können Sie das Incidin™ Wipes FlexPack verwerfen.

### ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen  
Schweiz  
+41(0) 44-877-2000  
www.ecolab.eu

### REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49(0) 2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

### REGIONAL OFFICE

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41(0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch

