

DESINFEKTIONS- UND REINIGUNGSMITTEL

Sekumatic® FDR

Aufbereitung von Instrumenten, Steckbecken,
Betten und Atemschutzmasken

Die aldehydfreie und effiziente Lösung
für die chemo-thermische Aufbereitung
in Betten- und Wagendekontaminations-
anlagen.

- ▲ Sichere Desinfektion
- ▲ Effektive Reinigung
- ▲ Gute Materialverträglichkeit



Sekumatic® FDR

Aufbereitung von Instrumenten, Steckbecken,
Betten und Atemschutzmasken

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Aldehydfrei mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin®	Sichere Desinfektion bei 60 °C, anwender- freundliche Formulierung ohne Aldehyde
Tensidarm, pH-neutral	Besonders schaumarm, sehr gute Materialverträglichkeit, starke Reinigungsleistung
Optimal abgestimmte Rezepturkomponenten	Erfüllt die Anforderungen des „AK-BWA“
Begutachtet durch die DEKRA EXAM (Prüfstelle für Atemschutz)	Sichere und materialschonende Desinfektion von Atemschutzgeräten
Hohe Anwendungssicherheit durch automatische Dosierung	Genauere Dosierung. Kein Produktkontakt des Anwenders

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Dichte	20 °C	1,03 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 5,5
pH-Wert* (Lösung, 5 - 10 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	6 - 8

* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	EINWIRKZEIT Sek.
Bakterizid (EN 13727) bei niedriger / hoher Belastung	0,15	30 (bei 55 °C)
Levurozid (EN 13624) bei niedriger Belastung	0,5	60 (bei 55 °C)
Levurozid (EN 13624) bei hoher Belastung	0,5	150 (bei 55 °C)
Viruzid nach RKI 1/2004	1	300 (bei 60 °C)

Bei Einsatz in chemisch-thermischen Steckbeckenautomaten wird eine
Anwendungskonzentration von 0,5 bis 1% bei 60 °C und mind. 60 Sek. Einwirkzeit,
bei benötigter Viruzidie 5 Min., empfohlen.

EINSATZMÖGLICHKEIT	DOSIE- RUNG	FLOTTEN- VERHÄLT- NIS**	DESINFEK- TIONSTEMP- ERATUR	EINWIRK- ZEIT
Waschschleudermaschine Desinfektion von Atemschutzgeräten	10 ml/L	1:5	60 °C	5 Min.
Reinigungs- & Desinfektionsgerät (RDG) Desinfektion von Atemschutzgeräten	10 ml/L		60 °C	5 Min.

** 1 L Wasser pro kg Trockenwäsche (Nennbeladung) der Maschine im Desinfektionswaschbad (Hauptwäsche)
(Beispiel: 1:5 = 5 L/kg Trockenwäsche). Anwendungsbeispiel: ml je kg Nennbeladung (Beispiel bei einer 14 kg Maschine:
50 ml x 14 kg = 700 ml Dosiermenge)

Vertrieb durch:

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0) 2173-599-1900



SICHER.
ALDEHYDFREI.



Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
für Medizinprodukte

ANWENDUNGSHINWEISE

Bei der Verwendung in Reinigungs-
und Desinfektionsgeräten (RDG) im
medizinischen Bereich wird eine
Anwendungskonzentration von
10 ml/L bei 60 °C und 5 Minuten
Einwirkzeit empfohlen. Dabei sind
die Angaben des Anlagenherstellers
zu berücksichtigen.

In Betten- und Containerwasch-
anlagen werden Anwendungs-
konzentrationen von 5 - 10 ml/L
bei 60 °C und 90 - 120 Sekunden
Einwirkzeit empfohlen.

Bei der Verwendung in Wasch-
schleudermaschinen und RDGs zur
Reinigung und Desinfektion von
Atemschutzmasken wird die Dosie-
rung von Sekumatic® FDR ab einer
Temperatur von 60 °C empfohlen.
Dabei sind die Angaben des Anlagen-
herstellers zu berücksichtigen.

ZUSAMMENSETZUNG

Nichtionische Tenside, alkoholische
Lösemittel, Komplexbilder, Korrosi-
onsinhibitoren.
In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
2 g Glucoprotamin®,
2 g Poly(oxy-1, 2-ethandiy),
alpha-[2-(didecylmethyl-ammonio)
ethyl]-Omega-hydroxy-propanoat
(Salz), 0,75 g Benzalkoniumchlorid

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne
unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Sekumatic® FDR Kanister	3 x 5 L	30 438 20

MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND
PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.