



# DÉTERGENT DÉSINFECTANT DE L'INSTRUMENTATION DENTAIRE

## DENTASEPT Tri-Enzymatic

### NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE L'INSTRUMENTATION DENTAIRE AVANT SA STÉRILISATION

- Complexe tri-enzymatique : Protéase / Lipase / Amylase
- Ne contient pas de chlorures
- 1 litre de solution concentrée fournit 200 litres de solution prête à l'emploi
- Efficace en seulement 7 minutes
- Actif sur les virus enveloppés
- Peut être utilisé en bacs à ultrasons
- pH neutre après dilution, compatible avec un large panel de matériaux



# DENTASEPT Tri-Enzymatic

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation dentaire avant sa stérilisation

## DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES


- pH du produit pur : env. 8,5
- pH après dilution (1%) en eau de réseau : 7,3
- pH après dilution (1%) en eau adoucie : 7,6

## MODE D'EMPLOI

**Solution concentrée. Pour le bidon de 5 L :** Amorcer la pompe associée avant la première utilisation.



1. S'utilise en trempage ou en bac à ultrasons à la dilution requise, en respectant le temps de contact indiqué.

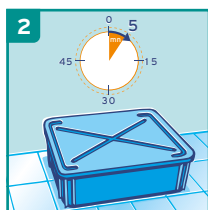

2. Immerger totalement le dispositif médical. Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact.



3. Brosse si présence de souillures apparentes.



4. Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.

Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

## TABLEAU DE DILUTION

| LITRE DE SOLUTION | CONCENTRATION DE LA SOLUTION D'APPLICATION |
|-------------------|--------------------------------------------|
|                   | 0,5%                                       |
| 1 litre           | 5 ml                                       |
| 2 litres          | 10 ml                                      |
| 5 litres          | 25 ml                                      |
| 10 litres         | 50 ml                                      |

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

| ACTIVITÉ / CONDITIONS                                      | CONCENTRATION | TEMPS DE CONTACT |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Bactéricide*<br>Selon EN 13727/EN 14561                    | 0,5%          | 5 min            |
| Levuricide*<br>Selon EN 13624/EN 14562                     | 0,5%          | 5 min            |
| Actif sur les virus enveloppés*<br>Selon EN 14476/EN 17111 | 0,5%          | 7 min            |

\*=conditions de saleté

## INFORMATION

| PRODUIT                 | CONDITIONNEMENT              | REFERENCE |
|-------------------------|------------------------------|-----------|
| Dentasept Tri-Enzymatic | 1 bidon de 5 L + pompe 10 ml | 3127800   |



D.M.D.  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribué par :  
**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Switzerland

## INDICATIONS

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation dentaire avant sa stérilisation.

## MODE D'EMPLOI

**Solution concentrée.**

**Pour le bidon de 5 L :** Amorcer la pompe associée avant la première utilisation.

1. S'utilise en trempage ou en bac à ultrasons à la dilution requise, en respectant le temps de contact indiqué.
2. Immerger totalement le dispositif médical. Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact.
3. Brosse si présence de souillures apparentes.
4. Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.

Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

## COMPOSITION

Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

## CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes de Dentasept Tri-Enzymatic est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

## POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



www.anios.com