

Aniosyme Synergy WD Plus



La force détergente pour votre stérilisation centrale

Détergent mono-enzymatique avec un fort pouvoir nettoyant

Aniosyme Synergy WD Plus est un produit de nettoyage liquide alcalin permettant de profiter du pouvoir nettoyant alcalin dans le retraitement automatisé des instruments. Il fournit d'excellentes performances de nettoyage grâce à sa formule mono-enzymatique spécialement développée, sans silicates, qui offre une grande compatibilité avec les matériaux.

- **PUISSANT** - Des performances de nettoyage élevées pour toutes les qualités d'eau, niveau de pH>10
- **ENZYMATIQUE** - Efficace sur tous les types de salissures présentes sur la charge
- **EFFICACE** - Excellente efficacité dès la concentration proposée standard de 0,3%. Jusqu'au maximum 1% et peut être utilisé pour toutes les qualités d'eau



CH REP **ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH**

Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Aniosyme Synergy WD Plus

Détergent Mono-Enzymatique avec un fort pouvoir nettoyant



Aniosyme Synergy WD Plus
Bidon de 5 litres



Aniosyme Synergy WD Plus
Bidon de 20 litres

Puissant

Niveau de pH > 10,5 lors de la phase de nettoyage – répond aux exigences du RKI pour Creutzfeldt-Jacob (Institut Robert Koch – Allemagne).

Enzymatique

Elimination efficace de tous les types de salissures présentes sur la charge, grâce à la formule mono-enzymatique sans silicates spécialement développée et applicable à différentes concentrations.

Efficace

Excellente efficacité dès la concentration proposée standard de 0,3%. Jusqu'au maximum 1% et peut être utilisé pour toutes les qualités d'eau.

Données chimio-physiques

• Densité	20°C	1,152 g/mL
• Valeur pH * (concentré)	20°C	10.0
• Valeur pH * à 0,3% (solution, 3 ml/L / l dans l'eau DI)	20°C	10,9
• Valeur pH * à 1% (solution, 10 ml/L / l dans l'eau DI)	20°C	11,0
• Conductivité à 0,3% (solution, 3 ml/L dans l'eau DI)	20°C	515 µS/cm
• Conductivité à 1% (solution, 10 ml/L dans l'eau DI)	20°C	1412 µS/cm
• Viscosité (concentré)	20°C	< 15 mPa/s

*Mesurez toujours la valeur du pH dans les conditions opérationnels au moyen d'un pH-mètre avec compensation de la température.

Informations de commande

Produit	Emballage	Référence
Aniosyme Synergy WD Plus Bidon	2 x 5 L	3100860
Aniosyme Synergy WD Plus Bidon	20 L	3110200



ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
Switzerland

www.ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Application

Détergent mono-enzymatique concentré pour des instruments médicaux. Nettoyage du matériel chirurgical et médical, des dispositifs médicaux dans laveurs-désinfecteurs ainsi que dans les tunnels de lavage.

Mode d'emploi

- Solution concentrée pour usage professionnel
- Utilisation dans laveur-désinfecteur et tunnel de lavage à un dosage de 0,3%
- Formule efficace dès 5 minute
- Ajustez la concentration, le temps de contact et la température de l'eau de dilution en fonction du degré de contamination, le programme de lavage, et le niveau de pH prévu pour la phase de nettoyage
- Température maximale: 60°C

Ingrédients

Tensioactifs, séquestrant, complexe enzymatique (protéase), excipients.

Stockage

Dangereux - respecter les instructions d'utilisation et l'étiquette du produit (établie conformément aux règles européennes en vigueur pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

Certificats

Disponible sur demande.

Utilisation sécurisée des dispositifs médicaux

Veuillez vous référer à l'étiquette et la fiche technique du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™