



IL PROGRAMMA COMPLETO PER LA DISINFEZIONE PROFESSIONALE DELLE SUPERFICI

Incidin™ Pro

Disinfettante per superfici, senza aldeidi e senza coloranti e profumi

Incidin™ Pro stabilisce un nuovo standard con la sua formula SMART-BALANCED per la pulizia e la disinfezione professionale delle superfici.

- ▲ il vostro pro per la rapidità
- ▲ il vostro pro per l'efficacia
- ▲ il vostro pro per la compatibilità

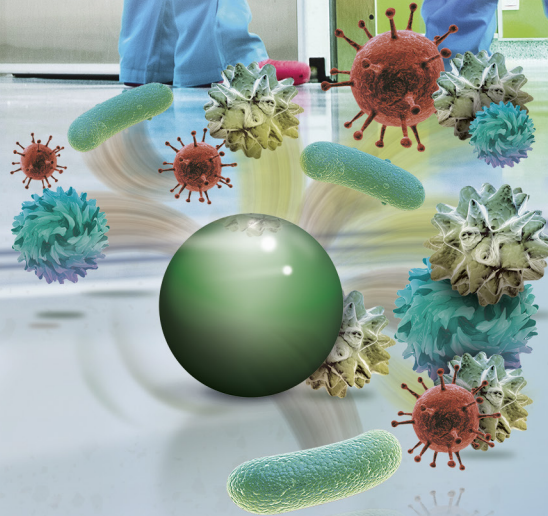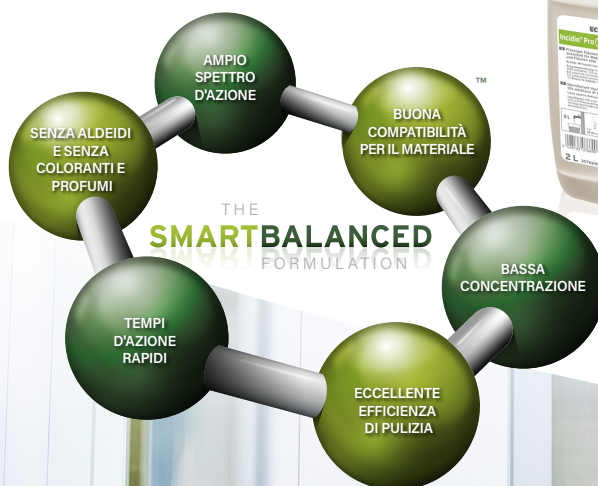

Incidin™ Pro

DISINFETTANTE PER SUPERFICI CLASSIFICATI COME DISPOSITIVI MEDICI E PER SUPERFICI DI TUTTI I TIPI

Perché usare Incidin Pro?

EFFICACIA AD AMPIO SPETTRO CON BREVI TEMPI DI CONTATTO

L'efficacia antimicrobica di Incidin Pro è caratterizzato dai suoi brevi tempi di contatto ed eccellente compatibilità con i materiali.

Efficace contro batteri, lieviti e vari virus (incluso il norovirus). Incidin Pro è adatto per aree ad alto rischio e per una vasta gamma di superfici, dai reparti generali e aree pubbliche alle sale operatorie e unità di terapia intensiva.

OTTIMA EFFICACIA DI PULIZIA E COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

È stato ampiamente testato su tutti tipi di superfici che si trovano comunemente in ambienti sanitari – da metalli, linoleum e PVC a ceramica, gomme e plastica – con ottimi risultati.

RISULTATI DEI TEST MICROBIOLOGICI E VIROLOGICI

EFFICACIA	CONCENTRAZIONE		TEMPO DI CONTATTO
	%	g/L	
Disinfezione delle superfici sec. VAH con azione meccanica (battericida, lieviticida, condizioni pulite e sporche)	0.5	5	30 min
	1.0	10	15 min
EN 16615 (battericida/lieviticida, condizioni pulite e sporche)	0,5 / 1	5 / 10	15 / 5
EN 13727 (battericida, condizioni pulite e sporche)	0.25	2.5	5 min
EN 13624 (lieviticida, condizioni pulite e sporche)	0.25	2.5	5 min
EN 14348 (tubercolicida, micobattericida, condizioni pulite e sporche)	1.5	15	60 min
EN 14476 (Norovirus, MNV)	1 / 1,5	10 / 15	60 / 30
EN 14476 (Limitatamente virucida PLUS) (incl. HIV, HBV, HCV) sec. alla raccomandazione RKI 01/2004*	2 / 1**	20 / 10**	30 / 60**
	0.5	5	15 min
Adeno*	2.0	20	60 min
Papova*	1.5	15	15 min
Rota*	1 / 1,5	10 / 15	60 min
Rota*	1.5	15	5 min
Noro*	1.5	15	30 min
EN 14476 Noro (MNV)	1	10	60 min
	1.5	15	30 min

*DVV 2015 **basso carico



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

RAPIDO
EFFICIENTE
COMPATIBILE

AREA D'APPLICAZIONE

Incidin Pro è un concentrato liquido adatto per le superfici classificati come dispositivi medici e per superfici di tutti i tipi in ambito sanitario.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire il concentrato con acqua (max 30°C) alla concentrazione desiderata. Bagnare l'intera superficie con sufficiente quantità di soluzione e lasciare asciugare. Per ottenere ad es. una soluzione allo 0,5% v/v preparare una diluzione di: 1:200 con idoneo acqua ad es. vengono aggiunti 5 ml di Incidin Pro a 995 ml d'acqua potabile, dando un volume totale di 1 litro.

INGREDIENTI

100 g contengono i seguenti principi attivi: 10,0 g 2-fenossietanolo, 8,0 g N,N-bis-(3-amminopropil) dodecilammina, 7,5 g di benzalconio cloruro.

IMBALLAGGIO E INFORMAZIONE PER L'ORDINAZIONE

PRODOTTO	IMBALLAGGIO	NUMERO D'ARTICOLO
Incidin Pro Sacchetto	400 x 20ml	30 765 60
Incidin Pro Flacone	3 x 2L	30 766 80
Incidin Pro Bidone	6L	30 767 60

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale a una temperatura inferiore a 25°C in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare.

Numero biocida CHZN 3555

USARE I BIOCIDI IN MODO SICURO. LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PRIMA DELL'USO.